


## STRAHLENSCHUTZABDECKUNG (SINGLE USE)

### ANGIO

Art. Nr. SA-AGS

Dämpfung:	> 92% bei 90 kVp
Bleigleichwert:	> 0,25mm
Material:	Bleifrei
Größe:	ca. 30 x 43 cm
Größe der Öffnung:	Ø ca. 4 cm
Anwendung:	Angiographie, Stents, koronare Katheterisierung, etc.
VK-Einheit:	Set à 15 Stck.

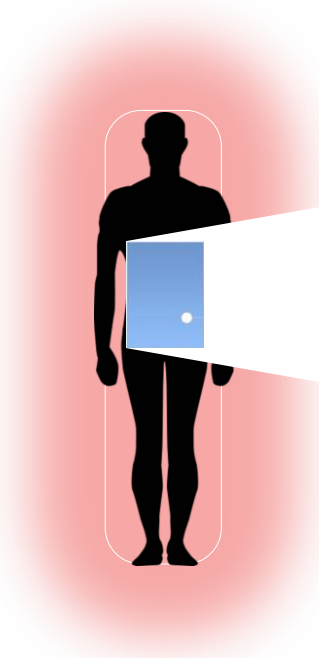

### Verwendung:

1. Aus dem Beutel entnehmen, ohne die Sterilität zu beeinträchtigen.
2. Platzieren Sie die Abdeckung auf dem Patienten.
3. Legen Sie den Fensterausschnitt über den Bereich in dem gearbeitet wird und richten sie es so aus, dass es Ihre Arbeit nicht behindert.
4. Bündeln Sie den Strahl auf die Fenstergröße, wenn Sie nur diesen Bereich betrachten wollen.
5. Schutzmaterial nicht im direkten Strahlengang positionieren.
6. Nutzen Sie die Abdeckung so, dass sie zwischen dem Direktstrahl und dem Arzt oder Techniker liegt, um den Sicherheitsschatten zu maximieren.
7. Sichern Sie die Abdeckung in der richtigen Position mit einem Klebestreifen. Kleben Sie nicht direkt auf die Haut des Patienten.

### Hinweise:

**Das Produkt ist steril, es sei denn, die Verpackung wurde geöffnet oder beschädigt.**

**Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt oder nicht steril ist !**

**Nur zusätzlich zu den routinemäßigen Strahlenschutzeinrichtungen verwenden, nicht anstelle der üblichen Schutzmaßnahmen.**